

DER-BERO-TREND® - Prothesenzahn**ZAHNMANUFAKTUR**
RIEDENBURG
DER BERO TREND**CE 0483****1. Name des Produktes**

DER-BERO-TREND® - Prothesenzahn

2. Definition

Die Bero Trend® - Kunststoffzähne sind individuell charakterisierte Zähne auf Basis von Polymethylmethacrylat und vernetzenden Copolymeren der Methacrylsäure.

3. SpezifikationEN ISO 22112:2017
Typ 1 und Typ 2 (Front- und Seitenzähne = Molaren)**4. Lieferprogramm**Lieferbar Leisten mit je 6 Frontzähnen bzw. 8 Molaren
Formen: siehe Formenkarte
Farben: entsprechend den Farbschlüsseln

Typ - Bezeichnung	Farben, Farb-System	Aufdruckfarbe, Bemerkungen
Der Bero-Trend ⁺	Bero, 17 Farben, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 39, 40, 41	gold
Der Bero-Trend C ⁺	Bero, 10 Farben, 13, 17, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 31, 41	kupfer, stark charakterisiert
Der Bero-Trend V	V, 16 Farben, 1A, 2A, 3A, 3.5A, 4A, 1B, 2B, 3B, 4B, 1C, 2C, 3C, 4C, 2D, 3D, 4D	silber
Der Bero-Trend V-C	V, 8 Farben, 1A, 3A, 3.5A, 2B, 3B, 3C, 4C, 3D	silber, stark charakterisiert

5. Zweckbestimmung / Anwendungsgebiete

Herstellung von Zahnprothesen. Das Haupteinsatzgebiet sind herausnehmbare Zahnprothesen. Sie sind aber auch zum Einsatz bei festsitzendem Zahnersatz geeignet.

6. Eigenschaften

Der Bero Trend - Zahn ist ein qualitativ hochwertiger individuell charakterisierter Kunststoffzahn auf Basis Polymethylmethacrylat und Copolymeren mit einem erheblichen Gehalt an Vernetzern. Der Vernetzeranteil führt zu hoher Zähigkeit und Verschleißfestigkeit. Durch individuelle Gestaltung der Zahnhäse, Seitenschatten, Schmelzrisserfärbung und Kalkfleck wird ein natürliches Aussehen erreicht.

7. HerstellerZahnmanufaktur Riedenburg, Inh.: Agnes Grosch
Am Gewerbebogen 11, 93155 Hemau**8. Haltbarkeit**

Bei sachgerechter Lagerung hat das Produkt kein Verfallsdatum.

9. Lagerung

Lagerung im Zahnschrank

10. Warnhinweise

Beim Beschleifen oder Polieren entstehende Stäube oder Partikel nicht einatmen! Geeignete Absaugung verwenden! In sehr seltenen Fällen wurden Überempfindlichkeitsreaktionen der Mundschleimhaut (Methyl-Methacrylat-Allergie) beobachtet. Bei Überempfindlichkeiten gegen Methyl-Methacrylat die Produkte nicht verwenden.

11. Einmalprodukt

Bei den DER-BERO-TREND – Prothesenzähnen handelt es sich um Einmalprodukte

12. Medizinprodukt

Es handelt sich bei den DER-BERO-TREND – Prothesenzähnen um ein Medizinprodukt

13. AnwendungVerbund mit Prothesenbasismaterial:
Der Verbund wird nach DIN EN ISO 22112:2017 getestet. Kunststoffzähne, insbesondere solche aus stark vernetzen Polymeren, wie Der Bero Trend - Zahn, sind vor dem Einbringen des Basismaterials oberflächlich aufzurauen und/oder mit Retentionen zu versehen. Der Verbund ist stark abhängig von der Art und der Verarbeitungsweise des Prothesenmaterials. Vor erstmaliger Verwendung einer neuen Kombination ist daher der Verbund zu kontrollieren.**14. Rückmeldungen / Vigilanz**

Alle mit dem Produkt zusammenhängende Nebenwirkungen und Vorfälle melden Sie bitte unverzüglich dem Hersteller.

15. KennzeichnungZahnmanufaktur Riedenburg
Am Gewerbebogen 11,
93155 Hemau
Made in Germany **CE 0483**

- HIBC-Herstellercode D964 mit Pluszeichen
- Artikelnummer mit Zusatzkontrollziffer „0“
- Lot-/Chargennummer mit vorgestelltem „S“-Zeichen
- Herstellungsdatum mit vorgestellter Kontrollziffer „160“ und nachgestelltem Kontrollbuchstaben „JK“
- Lot-/Chargennummer in Klarschrift mit LOT-Symbol
- Herstellungsdatum in Klarschrift mit Herstellungssymbol

16. Erstellung / Ausgabedatum der Gebrauchsanweisung**AUSGABE 12 / 01 01.2024**